

CZ

Návod k použití

ocusers sprej hyaluron

Liposomový oční sprej s 0,1% kyseliny hyaluronové.

Produkt je sterilní až do prvního otevření.

Aktivní látky

Fosfolipidní komplex

Hyaluronát sodný

Izotonický roztok, borát s vyrovnanou hodnotou pH 7.2

Forma a obsah

Oftalmologický roztok v 5ml/15ml rozprašovači.

Indikace

Sprej je třeba aplikovat na zavřené oči. Obsahuje kyselinu hyaluronovou. Pro hydratování, upokojení a výživu suchých očí. Vhodné i pro nositele kontaktních čoček. Kyselina hyaluronová je přírodní lubrikant, který chrání nebo upokojuje podrážděné oči kvůli nedostatku slz nebo z důvodu nošení kontaktních čoček delší dobu.

Dávkování, způsob a doba užívání

Sprej je třeba aplikovat na zavřené oči. Ocusers sprej hyaluron byl vyvinut tak, aby pokryl povrch oka postupně zvenku. Aplikujte na zavřené oko ze vzdálenosti přibližně 10 cm. Sprej neaplikujte jestli máte otevřené oči. Před prvním použitím, postlácejte aplikátor několikrát, aby se naplnil. Aplikujte jednu nebo dvě vrstvy na každé víčko. Sprej může být použit několikrát denně.

Vedlejší účinky

Pokud je aplikace v souladu s návodem k použití, nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Předávkování

Nejsou známy žádné případy předávkování.

Doba expirace a skladování

Doba expirace je uvedena vedle symbolu přesýpacích hodin. Udržujte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte po době expirace vyznačené na lahvičce a vnějším obalu.

Upozornění

Držte mimo dosahu dětí. Obsah lahvičky nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Neřanášejte přímo do oka! Nepoužívejte v případě alergie nebo přecitlivělosti na jednu nebo více složek uvedených výše. Nepoužívejte produkt na vodu rozpustný makeup, protože liposomy by mohli zanést částičky makeupu do oka.

Zdravotnický prostředek.

Distributor:

Medicoselect SK, s.r.o.

Detva 3317

962 12 Detva, Slovenská republika

Výrobce:



innomedis ag

Walther-Rathenau-Str. 5

D-50996 Köln



CE
0481

STERILE | A