

**CZ**

## Návod k použití

### ocusers sprej lipostamin

#### Oční sprej s lipozomy a aeufrazií lékařskou.

Produkt je sterilní až do prvního otevření.

#### Aktivní látky

Fosfolipidný komplex

Rostlinné extrakty z:

Capparis spinosa, Helychrysum italicum, Euphrasia officinalis, Glycyrrhiza glabra

Izotonický roztok, borát s vyrovanou hodnotou pH 7.2

#### Forma a obsah

Oftalmologický roztok v 5ml/15ml rozprašovači.

#### Indikace

Sprej se základem z lipozomů a rostlinných extraktů, které mají ulevit při podráždění očí pylem, prachem nebo jinými externími faktory, je třeba aplikovat na zavřené oči a víčka. Pokud je sprej používán pravidelně, vytvoří se na povrchu oka tenká ochranná vrstva, která zabrání podráždění očního povrchu alergény.

#### Dávkování, způsob a doba užívání

Sprej aplikujte na zavřené oči ze vzdálenosti přibližně 10 cm. Opakujte několikrát denně nebo podle potřeby. Před prvním použitím, postáčejte aplikátor několikrát, aby se naplnil.

#### Vedlejší účinky

Pokud je aplikace v souladu s návodem k použití, nejsou známy žádné vedlejší účinky.

#### Předávkování

Nejsou známy žádné případy předávkování.

#### Doba expirace a skladování

Nepoužívejte po době expirace vyznačené na lahvičce a vnějším obalu. Doba expirace je uvedena vedle symbolu přesýpacích hodin. Udržujte na chladném a suchém místě.

#### Upozornění ⚠

Držte mimo dosahu dětí. Obsah lahvičky nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte obsah balení. Nepoužívejte v případě alergie nebo precitlivělosti na jednu nebo více složek uvedených výše. Nepoužívejte produkt na vodou rozpustný makeup, protože lipozomy by mohli zanést částičky makeupu do oka.

#### Zdravotnický prostředek.

#### Distributor:

Medicoselect SK, s.r.o.

Detva 3317

962 12 Detva, Slovenská republika

#### Výrobce:



innomedis ag

Walther-Rathenau-Str. 5

D-50996 Köln



CE

0481

STERILE A